



SCORE MOBILITY WORK CHAIR

MANUAL

Score[®]

📍 Feithspark 5
9356 BX Tolbert
The Netherlands

☎ +31 (0) 594 55 40 00
✉ info@scoreseating.com

NL Deze manual is van toepassing op de volgende modellen:

GB This manual applies to the following models:


D Diese Anleitung gilt für folgende Modelle:

- Mobility Work Chair 2300, F (Fixed) / T (Tilt)
- Mobility Work Chair 2300 Arthrodesse, F (Fixed) / T (Tilt)
- Mobility Work Chair 5000, S (Synchro)
- Mobility Work Chair 5000 Arthrodesse, T (Tilt)
- Mobility Work Chair 5100 M, S (Synchro)
- Mobility Work Chair At Work, S (Synchromatic) / F (Flowmatic)

NL Onderdelen

GB Parts

D Komponenten

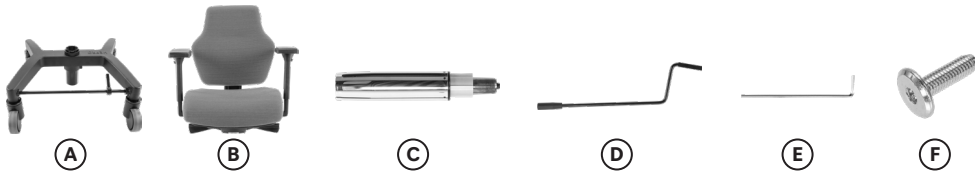


1

NL Bij rechtshandige montage van de remhendel kunt u stap 1 overslaan. Zie onderstaande stap voor montage voor linkshandig gebruik van de remhendel.

GB If you install the brake lever right-handed, you can skip step 1. For left-handed use of the brake lever, see mounting step below.

D Wenn Sie den Bremshebel rechtshändig montieren, können Sie Schritt 1 überspringen. Informationen zur linkshändigen Verwendung des Bremshebels finden Sie im nachstehenden Installationschritt.

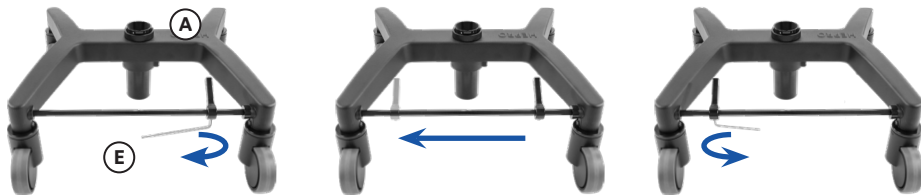



NL Linkshandige montage van de remhendel is niet mogelijk bij de 2300 en 5000 modellen!

GB Left-handed mounting of the brake lever is not possible on the 2300 and 5000 models!


D Eine linkshändige Montage des Bremshebels ist bei den Modellen 2300 und 5000 nicht möglich!



2

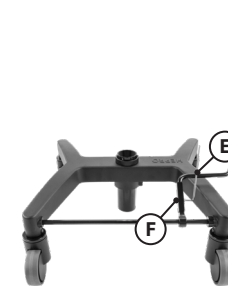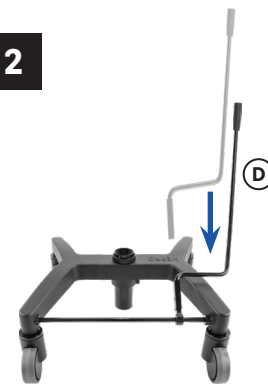

3

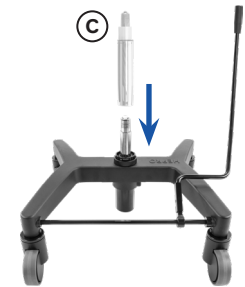

4

NL Plaats de zitting zo precies mogelijk op de gasveer, met de handremhendel aan de achterzijde van de zitting. De zitting kan na het plaatsen vanwege de klembevestiging op de gasveer niet bijgedraaid worden.

GB Place the seat on the gaslift as precisely as possible, with the handbrake lever on the back of the seat. The seat cannot be turned after installation due to the clamping attachment on the gaslift.

D Platzieren Sie den Sitz so genau wie möglich auf der Gasfeder, mit dem Handbremshebel an der Rückseite des Sitzes. Durch die Klemmbefestigung an der Gasfeder kann der Sitz nach der Montage nicht mehr gedreht werden.



NL Bediening handrem en voetensteun

GB Handbrake and footrest operation

D Handbremse und Fußrastensteuerung

NL Zorg ervoor dat tijdens het trippelen de voetensteun is ingeklapt!

GB Make sure that the footrest is folded in when you trip!

D Achten Sie darauf, dass die Fußstütze beim Stolpern eingeklapt ist!

